

Indicadores sonoros y visuales

El botón "RECORD" (Registrar) funciona únicamente cuando el dispositivo está **conectado** a los electrodos.

El botón "SEND" (Enviar) funciona únicamente cuando el dispositivo **no está** conectado a los electrodos.

CONDICIONES NORMALES		
Función del dispositivo	Indicador sonoro	Indicador visual
El dispositivo se activa por primera vez	1 sonido ascendente	Luz verde intermitente (3 segundos)
Se conecta el conductor al electrodo (en cualquier momento tras la activación inicial)	1 sonido ascendente	Luz verde intermitente (3 segundos)
REGISTRAR un evento	3 pitidos cortos	Luz verde intermitente (15 segundos)
Registro finalizado	1 pitido corto	Se detiene la luz verde intermitente
Se desconectan los conductores de los electrodos	1 sonido descendente	Luz anaranjada intermitente (3 segundos)
ENVIAR un evento	1 sonido ascendente, una pausa, tono continuo y modulado de transmisión	Luz verde intermitente (3 segundos)
Envío completo	Finaliza el tono modulado de transmisión	Ninguno
Memoria llena	Ninguno	Luz anaranjada intermitente (cada 10 segundos)

CONDICIONES DE ERROR		
Función del dispositivo	Indicador sonoro	Indicador visual
El botón "SEND" (Enviar) está apretado, pero no se almacenó el registro	1 sonido descendente	Luz anaranjada intermitente (1 segundo)
El botón "SEND" (Enviar) está apretado, pero los conductores están conectados	1 sonido descendente	Luz anaranjada intermitente (1 segundo)
El botón "RECORD" (Registrar) está apretado, pero los conductores no están conectados	1 sonido descendente	Luz anaranjada intermitente (1 segundo)
El botón "RECORD" (Registrar) está apretado mientras el dispositivo transmite	Ninguno	Luz anaranjada intermitente (1 segundo)
El botón "SEND" (Enviar) está apretado nuevamente si transmite el dispositivo	Ninguno	Luz anaranjada intermitente (1 segundo)
Batería baja (cambie el dispositivo)	Ninguno	Luz anaranjada intermitente (de manera continua)



Instrucciones para el paciente

Nombre: _____

Fecha de nacimiento: _____

Identificación del paciente: _____

Médico que solicita el estudio: _____

Fecha de inicio del control: _____

Fecha de finalización del control: _____

Cuando finalice el control, coloque la tarjeta del evento Zio™ en el sobre con franqueo pagado que se adjunta y envíela a iRhythm Technologies, Inc. para que se la recicle.

iRhythm recicla la totalidad de los dispositivos que recibe. No se desecha ninguna pieza de los dispositivos.

Su médico ha recetado un control a largo plazo de la actividad eléctrica del corazón. Este procedimiento habitual lleva el nombre de control de evento. Para lograr los mejores resultados, use la tarjeta del evento Zio™ todo el tiempo mientras realiza sus actividades cotidianas. Trate de no mojarse mientras utilice la grabadora. **¡Este dispositivo no es resistente al agua!**

Si en algún momento sufre de síntomas graves o si siente que debe atenderse inmediatamente, llame al 911.

event

1) Conexión de la tarjeta del evento Zio™

- Limpie con alcohol la zona de la piel donde colocará el electrodo; aféitela si esta tiene vello.
- Tome dos electrodos Lead-Lok® que se encuentran en el paquete y vuelva a sellarlo para que no se deterioren los electrodos restantes.
- Una los cables de la tarjeta del evento Zio™ con los electrodos. Levante la pestaña inferior por la ranura y coloque el cable por debajo y a través de la ranura (**Figura 1**).
- Coloque los electrodos en el pecho (**Figura 2**) (el blanco en el costado derecho del pecho y el negro en el costado izquierdo).
- Asegúrese de que los electrodos se encuentren bien adheridos al pecho.

2) Registro de un evento

- Cuando presente síntomas, oprima y mantenga apretado el botón "RECORD" (Registrar) durante algunos segundos (**Figura 3**).
- Cuando haya comenzado el registro, se emitirán tres pitidos y destellará una luz verde de manera continua.
- Cuando finalice el registro, se emitirá un pitido y la luz verde se apagará.


3) Transmisión

- Busque un lugar tranquilo. Los ruidos fuertes pueden interferir en la transmisión.
- Llame al iRhythm National Clinical Center (Centro Clínico Nacional de iRhythm) al **(888) 693-2401** desde un teléfono fijo o portátil. **Los teléfonos celulares no transmiten la información correctamente.**
 - Un técnico le explicará el proceso de transmisión.
- Cuando se le indique, oprima los electrodos contra la piel y desconecte los cables al mismo tiempo.
- Coloque la tarjeta del evento Zio™ con la cara hacia arriba en una superficie plana y estable.
- Coloque el micrófono del teléfono directamente sobre el puerto de sonido ubicado junto al símbolo de teléfono que se encuentra en el dispositivo (**Figura 4**).
- Oprima y mantenga apretado el botón "SEND" (Enviar) durante unos segundos hasta que oiga el pitido de la tarjeta de registro Zio™ (también destellará una luz verde) (**Figura 5**).
- Durante la transmisión, se debería oír un sonido modulado similar al del fax.
 - Cuando el sonido se detenga, tome el teléfono y hable con el técnico.
- De ser necesario, el técnico le indicará que vuelva a realizar la transmisión.


4) Reconexión del dispositivo luego de una transmisión satisfactoria

- Vuelva a conectar los cables con los electrodos en el pecho (**Figura 6**).
- Cuando se vuelva a conectar el dispositivo, se borrará toda la información para el siguiente registro y comenzará a controlar su ritmo cardíaco automáticamente.


SI NECESITA ASISTENCIA,
COMUNÍQUESE CON EL IRHYTHM NATIONAL CLINICAL CENTER
(CENTRO CLÍNICO NACIONAL DE IRHYTHM), LLAMANDO AL
(888) 693-2401

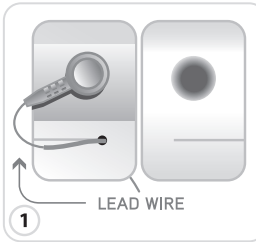


Electrodo Lead-Lok®

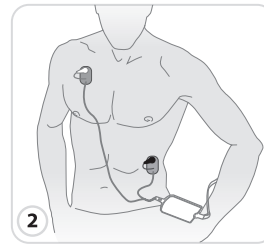


Colocación de los electrodos

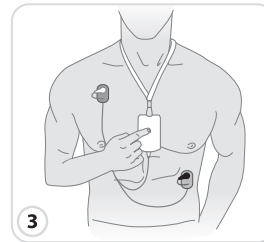


Paciente que registra un evento

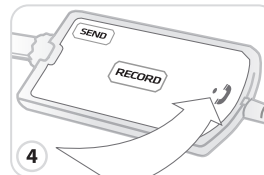

Puerto de sonido de la tarjeta del evento Zio™

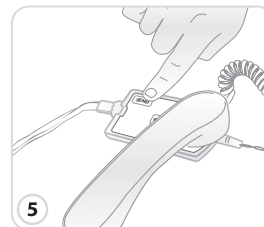

Oprima el botón "SEND" (Enviar)

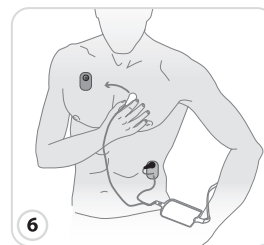

Reconexión de la tarjeta del evento Zio™

RECUERDE

- Retire la tarjeta del evento Zio™ antes de bañarse o ducharse (no es necesario que retire también los electrodos)
- Cambie los electrodos cada dos o tres días, o cuando empiecen a despegarse
- No use lociones ni cremas en las zonas donde colocará los electrodos, ya que estas evitan el contacto de los mismos
- Para evitar la irritación de la piel, mueva ligeramente los electrodos de la posición anterior cuando los cambie
- No se mueva y trate de no hablar cuando registre un evento
- Asegúrese de transmitir la información lo antes posible. El dispositivo puede almacenar hasta dos registros. Si la memoria está llena, no podrá registrar más eventos hasta que no transmita la información

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Use la tarjeta del evento Zio™ en todo momento o según las indicaciones de su médico.
- Si en algún momento sufre de síntomas graves o si siente que debe atenderse inmediatamente, llame al 911. La tarjeta del evento Zio™ no brindará asistencia médica de ningún tipo y no puede comunicarlo con personal médico
- Para reciclarla, coloque la tarjeta del evento Zio™ en el sobre con franqueo pagado que se adjunta y envíela a través de cualquier buzón en los Estados Unidos
- Si necesita asistencia, comuníquese con el iRhythm National Clinical Center (Centro Clínico Nacional de iRhythm), llamando al: **(888) 693-2401**. Si desea obtener más información acerca del dispositivo, visite www.zioreports.com